

National Institute for Occupational Safety and Health
NIOSH

認定・高機能防塵マスク

N95 規格品 ZYB-11


NIOSH 承認番号 TC-84A-7877



National Institute for Occupational Safety and Health
NIOSH



**N95 RESPIRATOR MASK
HEADBAND STYLE**

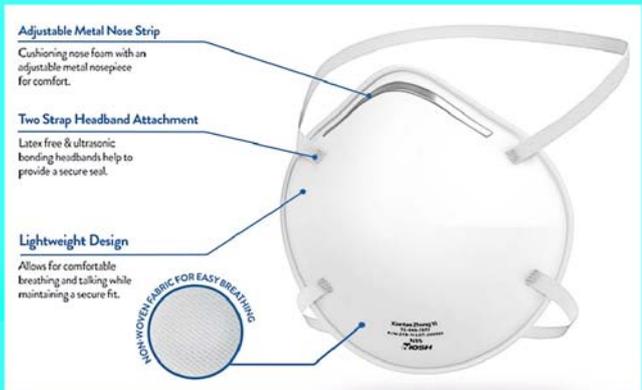

MULTI-LAYER PROTECTION



4層立体構造

特長

- マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりにくい構造です。
- 超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。
- 軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。

NIOSH とは、
国立労働安全衛生研究所 (National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) で
業務関連傷害・疾病の防止を目的とした研究および啓発を行う連邦機関で
米国保健社会福祉省 (Department of Health and Human Services: DHHS)
管轄下の疾病対策予防センター (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) の 1 組織です。

ZYB-11 (NIOSH 承認番号) マスクは、
(TC-84A-7877)

厳しい NIOSH の基準をクリアした高機能防塵マスクです

CDC テストレポート

NIOSH 認定証

防塵マスク NIOSH 規格

Certified Equipment List	
Respirator Details	
Schedule	844
Approval #	7877
Manufacturer Code	825
Approval Date	10/26/2017
Product Line	Model ZYB-11 N95 Filtering Facepiece, Air Purifying Respirator
Product Type	Air Purifying
Air Purifying Type	Particulate Filtering
Atmosphere Supplying Type	
For Protection Against	N95
Rated Service Time (mins)	
Facepiece Type	Filtering Facepiece
Powered?	Non-powered
Number of Filters	1
Replaceable Filter?	No
Filter Location	Filtering Facepiece
Cartridge or Canister	
Number of Car's/Can	
Location of Car's/Can	
Replaceable Car's/Can?	
SCBA Type	
SAR Type	
SCBA Use	
Air Flow	
Breathing Gas	
% Oxygen in Breathing Gas	
Regulator Location	
Low Temperature (C)	
Low Temperature (F)	
Exhalation Valve?	No
Sold Separately?	No
Obsolete?	No
Private Label	
Model	
Rated Duration	
Cylinder PWS	
CBRN Approval Date	
Comments	
Results Page	View Search

アメリカ労働安全衛生研究所 認証品

アメリカ合衆国国立労働安全衛生研究所 (NIOSH) 認証品

規 格	米国 NIOSH N95 規格
固体粒子	NaCl
粒子径	0.075+0.02 μm
区 分	使い捨て式
微粒子ろ過率	N95 : 95%以上
PFE	N99 : 99%以上 N100 : 99.97%以上
備 考	N : Not resistant to oil (耐油性無し)

マスクの装着手順

Step-1



マスクを縦に持ち、
ノーズクランプを
上にして左右に
開きます。

Step-2



ノーズクランプを鼻
の形に合わせて曲げ、
マスクをしっかりと
顔に当てます。下部
のヘッドバンドを
伸ばして後頭部へ
引張り耳の下側
に掛けます

Step-3



上部のヘッドバン
ドを伸ばして後頭
部へ引張り耳の上
側に掛けます。

Step-4



ノーズクランプを
押曲げて、鼻に
フィットさせます。

Step-5



装着したらフィットチェック
を行って下さい。両手で
マスクを覆い、息を吐き出し
空気漏れのチェックをして
下さい。空気漏れを感じたら
密着の良い状態にマスクを
合わせ直して下さい。

商品の特長	● 4層立体構造 ● 高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます ● 排気弁なし、カップタイプ ● 顔への高密着性ソフトな着用感
メーカー名	Xiantao Zhongyi Safety & Protection Products Co., Ltd
内 容 量	1 箱 20 枚入
原 産 国	中国
マスクサイズ	115×160mm
材 質	本体：外層 PP スパンボンド不織布 中層①PP メルトブロー高ろ過不織布 中層②PP ニードルパンチ不織布 内層 PP スパンボンド不織布 紐部：ポリウレタン ノーズクランプ部：鉄、ポリプロピレン

JAN コード



4 570057 950017

お問合せ：

発
売
元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記 Web フォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp